



BIO-HD

COMMENT BIEN UTILISER UN MASQUE ?

Barrette nasale

Plis
descendants

Elastique
à l'extérieur



Filtration \geq **98%**



Se laver les mains avec de l'eau et du savon ou du gel hydroalcoolique. Saisissez le masque par les élastiques (à l'extérieur), la pince nasale positionnée vers le haut. Placez les élastiques autour des oreilles.




Placez la pince nasale sur le nez et appuyez pour ajuster le masque. Abaissez le bas du masque sous le menton. Vous devez couvrir la bouche et le nez avec le masque.



Appuyez légèrement sur la pince nasale autour du nez pour bien ajuster le masque afin qu'il n'y ait pas d'espace entre votre visage et le masque. Une fois ajusté ne plus toucher le masque avec les mains.



Pour ôter le masque enlevez par l'arrière (ne pas toucher le devant du masque), jeter le dans une poubelle fermée.

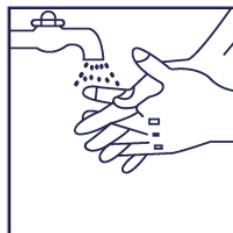

Se laver les mains à l'eau et au savon avant et après toute utilisation du masque..

TYPE IIR
USAGE UNIQUE
3 PLS
NON STERILE
EMBALLAGE INDIVIDUEL
NORME EN 14683+AC : 2019