## MASQUE C-AIR2

PATION GAP MASQUE GRAND PUBLIC Catégorie 2 Taux Filtration Mesuré 81,7% à neuf Taux Filtration Mesuré 91% à 50 lavages

# **5 GESTES "BARRIÈRE"**

Pour freiner le coronavirus

- 1. PRÉVENTION Rester chez vous
- **2. COUDE** Toussez dedans
- **3. VISAGE** Eviter de le toucher
- 4. DISTANCES Gardez-les
- 5. MAINS Lavez-les souvent

#### Référence C-AIR2

#### Protocole d'essais

- ■Selon note interministérielle du 29 mars 2020, mise à jour du 26 avril 2020.
- Les mesures communiquées sont issues des tests effectués par le laboratoire IFTH rapports numéro :
- A neuf 2020-04-17-012-1.
- A 50 lavages 2020-06-22-013-0.

#### Matières

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100

Double couches

- ■Couche extérieure Jersey 65% coton 35% polyester 160 gr/m²
- ■Couche intérieure 100% polyester Aerosilver® 115 gr/m²

#### Conditions d'entretien

Selon recommandations de l'ANSM



Repassage sur face extérieure Testé à 50 cycles de lavages

#### Coloris

Face externe BLANC

Face interne ÉCRU

### Descriptif

#### Domaine d'utilisation :


- ■Ce masque à usages non sanitaires est destiné à prévenir les projections de goutelettes vers un tiers.
- ■Ce masque à visée collective est destiné à protéger l'ensemble d'un groupe portant ces masques dans le cadre de leur activité professionnelle. Ce masque est porté par des personnes ayant des contacts professionnels occasionnels avec d'autres collègues. Ce masque pourra être indifféremment proposé aux professionnels ou au grand public.
- ■Longueur 20 cm x largeur 10 cm

#### Taille

Taille unique

#### Conditionnement

Lot de 10 masques

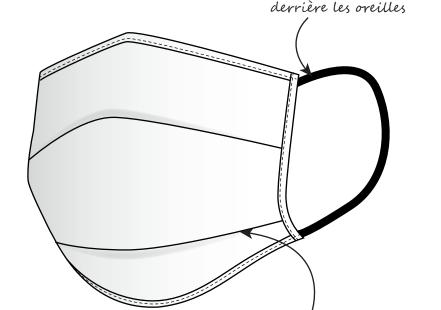

Les marques du groupe CEPOVETT









Plis plats

Elastiques à positionner





- Très bonne respirabilité (pour une dépression de 100 Pa) :
  - A neuf. Perméabilité à l'air : 517.5L.m<sup>2</sup>.\$
- A 50 lavages, Perméabilité à l'air : 491L.m<sup>2</sup>.S <sup>-1</sup>
- ■Très léger
- ■100% maille pour un confort optimal
- ■Bon rapport perméabilité à l'air / Performance de filtration
- Efficacité de filtration des particules de 3µm : 81,7% à neuf / 91% à 50 lavages

#### Conseil d'utilisation

- ■L'utilisation de ce masque s'inscrit dans la stricte application des mesures liées au confinement, des mesures d'organisation du travail ainsi que des gestes barrières.
- ■Une notice d'utilisation accompagne ce produit. Chaque porteur devra en prendre connaissance.
- ■Le temps de port du masque est limité à 4 heures.
- ■Ce masque n'est pas destiné à être utilisé par les personnels soignants au contact de patients.







