

FICHE TECHNIQUE
TEST D'ALCOOLEMIE

Ref. : TEST D'ALCOOLEMIE – Conforme à la norme NF X20-702

Caractéristiques techniques :



Description :

Ethylotest à usage unique sous sachet individuel.

Taux : 0,25 mg par litre d'air expiré équivalent à 0,5 g par litre de sang.

Produit estampillé NF Ethylotest.

Composition :

1 test réactif.

1 ballon muni d'un embout buccal avec valve.

1 sachet transparent avec marquage de la traçabilité.

Présentation :

Test glissé dans le ballon, ballon plié en quatre.

Mode d'emploi imprimé sur le ballon.

Le tout conditionné individuellement dans un sachet transparent.

(dimensions du sachet en mm 240x60x18)

Validité :

24 mois, la date limite d'utilisation est inscrite sur le sachet.

Stockage :

Eviter un stockage prolongé à plus de 40°C.

Il est recommandé de maintenir l'éthylotest dans son emballage d'origine jusqu'au moment de l'utilisation.

Mode d'emploi

1. Sortir le tube de la partie supérieure du ballon
2. Gonfler le ballon en une seule fois (souffler directement dans valve bleue du ballon)
3. Enfoncer au maximum les 2 extrémités du tube entre le pouce et l'index
4. Insérer le tube coté bleu à fond dans la valve du ballon
5. Vider entièrement le ballon au travers du test réactif
6. Attendre deux minutes pour interpréter le résultat.
En présence d'alcool, les cristaux de réactif se colorent en vert.
Si la coloration verte atteint ou dépasse le trait central, l'éthylotest est positif, ne conduisez pas !

• **Code Article Esculape : 8205110**

• **Code EAN : 3382140072411**