

AVERTISSEMENTS



CE MASQUE DOIT IMPERATIVEMENT ETRE LAVÉ EN MACHINÉ UNE PREMIÈRE FOIS AVANT UTILISATION

(Se reporter aux instructions de lavage page 2)

Pour protéger votre santé et celle des autres, il est très important de respecter cette notice d'utilisation.

Si vous êtes malade, ce masque n'est pas adapté. Demandez l'avis de votre médecin.

Ce masque n'est **pas destiné au personnel soignant.**

Ce dispositif n'est ni un dispositif médical au sens du Règlement UE/2017/745 (masques chirurgicaux), ni un équipement de protection individuelle au sens du Règlement UE/2016/425 (masques filtrants de type FFP2). L'attention est portée sur le fait que la protection partielle par les masque barrière de l'utilisateur contre les particules inférieures à 3µm est de 94%, là où le masque de protection respiratoire FFP2, testé dans les conditions de laboratoire, a une performance de l'efficacité de filtration de 96% au minimum.

Vérifiez toujours que le masque est **bien ajusté et couvre votre bouche et votre nez.** Il est recommandé de porter ce masque sur une peau nue, le port de la barbe peut réduire l'efficacité de filtration en dehors des limites visées.

La **durée maximale d'utilisation est de 4 heures.**

Ce masque **ne remplace pas les gestes barrières** (lavage régulier des mains, distinction physique, réduction des contacts avec d'autres personnes). Il ajoute une barrière physique permettant à l'utilisateur de protéger son environnement contre les projections des particules. Il peut également apporter à l'utilisateur une protection limitée contre les agents infectieux.

Malgré tout le soin apporté à la fabrication de ces masques, il appartient au seul utilisateur, et en aucun cas au fabricant ou au fournisseur, de s'assurer de l'adéquation du masque avec les caractéristiques du milieu d'usage. Il convient de suivre scrupuleusement les recommandations et modalités d'usage décrites dans cette notice d'utilisation.

Domaine d'utilisation :

Ce masque est destiné au milieu professionnel ou grand public et est exclusivement réservé à des usages non sanitaires. Il est destiné à prévenir les projections de gouttelettes. L'utilisation de ce masque s'inscrit dans la stricte application des mesures liées au confinement, des mesures d'organisation du travail ainsi que des gestes barrières. Ce masque à visée collective est destiné à protéger l'ensemble d'un groupe portant ces masques dans le cadre de leur activité professionnelle. Ce masque est porté par des personnes ayant des contacts professionnels occasionnels avec d'autres collègues (entreprise, service, bureau). Il n'est pas destiné à être utilisé par les personnels soignants au contact des patients. Ce masque pourra être indifféremment proposé aux professionnels ou au grand public.

Contexte d'utilisation : ce masque est strictement adapté à la crise sanitaire liée au COVID 19.

Performances :

Composition: 1 couche 80% PES + 20% Coton de 120g/m² +/-10% (externe) / 1 couche micropolaire 100% PES de 140g/m² (interne)

Protocole d'essais décrit dans le document DGA du 25 mars 2020

Masque catégorie 1

Efficacité de filtration des particules de 3 µm : > 90%

Respirabilité : essai de perméabilité à l'air > 96 L./m².s-1 pour une dépression de 100 Pa

Matériau dont les performances ont été mesurées par les laboratoires de DGA Maîtrise NRBC, 5 rue Lavoisier, 91710 Vert-le-Petit (rapport RP/20-4131/DGA MNRBC/2000305/NP) et qui supporte **150 lavages** (rapport IFTH 20-01841).



COMMENT PORTER LE MASQUE ?

Avant de le mettre :

- Lavez-vous les mains avec de l'eau et du savon ou une solution hydro-alcoolique.
- Inspectez le masque et assurez vous qu'il n'y a pas de trous, déchirures ou dégradations.
- Il est recommandé de porter le masque sur une peau nue, en évitant le contact avec les cheveux.
- Ne modifiez jamais le masque de quelque façon que ce soit.

Pour le mettre :

- Tenez le masque par les lanières élastiques.
- Placez-le au niveau de votre bouche.
- Passez les lanières élastiques derrière les oreilles.
- Ajustez le masque de façon à recouvrir le nez, la bouche et le menton : vous pouvez pincer la barrette nasale pour vous aider.

Lorsque vous le portez :

- Évitez de le toucher et de le déplacer.
- Ne le mettez jamais en position d'attente sur le front ou sur le menton.

Il faut changer le masque :

- Quand vous avez porté le masque 4h.
- Quand vous souhaitez boire ou manger.
- Quand il devient difficile de respirer.
- Si le masque s'humidifie.
- Si le masque et/ou la barrette nasale sont endommagés.
- Si le masque est déformé et ne tient plus correctement contre votre visage.

Pour l'enlever :

- Lavez-vous les mains avec de l'eau et du savon ou de la solution hydro-alcoolique.
- Décrochez les lanières élastiques pour décoller le masque de votre visage (ne pas toucher le devant du masque).
- En attendant de le laver, isolez-le dans un sac en plastique à jeter par la suite ou dans un sac réutilisable lavable.
- Si le masque est déformé ou usé, jetez-le tout de suite dans une poubelle qui se ferme.
- Pour terminer : Lavez-vous à nouveau les mains avec de l'eau et du savon ou de la solution hydro-alcoolique.

COMMENT ENTRETENIR LE MASQUE ?

Avant ouverture :

Stockez le masque dans son emballage protecteur d'origine, dans un endroit sec et à l'abri des rayons du soleil. Conservez-le dans une humidité maximale de 75% et à une température comprise entre -2°C et + 55°C, afin de préserver toutes ses caractéristiques.

Première utilisation :

CE MASQUE DOIT IMPERATIVEMENT ETRE LAVÉ EN MACHINE UNE PREMIÈRE FOIS AVANT UTILISATION

Pour le lavage :

- Lavez le masque à la machine avec avec un produit lessiviel adapté au tissu, dont le cycle comprendra au minimum un plateau de 30 minutes à 60°C. Vous pouvez le mettre en machine avec votre linge.
- Après avoir touché le masque, lavez-vous les mains avec de l'eau et du savon ou de la solution hydro-alcoolique.
- Ce masque a été testé pour 150 lavages. Après 150 lavages, la

filtration du masque n'est plus garantie.

- Lorsque la machine est terminée, sortez le masque et remettez-le en forme en aplatissant la barrette nasale et en reformant les plis sans forcer.

Après le lavage :

Faites sécher le masque dans son intégralité (les couches intérieures doivent également être totalement sèches).

Pour cela, vous pouvez:

- utiliser un sèche-linge (en veillant à nettoyer les filtres du sèche-linge et à vous laver les mains après),
- utiliser un sèche-cheveux,
- ou encore, faire sécher votre masque à l'air libre, sur un support propre et désinfecté.
- Repassez votre masque à la vapeur à une température de 120/130°C.
- Dès que le masque est sec, stockez-le pour le conserver dans un emballage propre hermétique (sachet plastique ou sac de congélation par exemple).

DECOMPTE D'UTILISATION DU MASQUE ?

Les masques pouvant être lavés 150 fois, chaque masque est donc utilisable 150 fois. Pour vous aider à suivre et gérer le décompte d'utilisation de vos masques, veuillez utiliser un tableau comme celui-ci :

	Utilisation 1	Utilisation 2	Utilisation 3	Utilisation 4	Utilisation 5	Utilisation 6	Utilisation ...	Utilisation ...	Utilisation ...	Utilisation 150
Masque N°										

35-39, Quai du clos des Roses / BP 40602 – 60206 COMPIEGNE CEDEX (France)

Contact - Tél: 03.44.92.10.10 – E-Mail : info@codupal.fr

Société anonyme au capital de 520 232,27 € – Siret 927 220 343 00051 – Code APE 182A – RCS PARIS B 927 220 343 – C.C.P Paris 21.535-58E

Doc M03 - Masque barrière grand public à usage non sanitaire COV2CPCMP - Catégorie 1 - 14 Septembre 2020