

# PINCE MI

ACCESSOIRES POUR MASQUES DE PROTECTION  
CHIRURGICAUX OU TISSU

SANS PINCE MI



**ANTI BUÉE**  
POUR PORTEURS DE LUNETTES

SANS PINCE MI



**+ DE MAINTIEN**  
ET DE CONFORT

SANS PINCE MI



**+ ÉTANCHÉITÉ**  
ET DE SÉCURITÉ

AVEC PINCE MI



**ANTI BUÉE**  
POUR PORTEURS DE LUNETTES

AVEC PINCE MI



**+ DE MAINTIEN**  
ET DE CONFORT

AVEC PINCE MI



**+ ÉTANCHÉITÉ**  
ET DE SÉCURITÉ

# PINCE MI, C'EST QUOI ?

## PLUS D'ÉTANCHÉITÉ : ANTI BUÉE

PINCE MI est un petit **accessoire anti buée pour les masques de protection** tissu ou chirurgicaux. Il permet de limiter la buée sur les lunettes de vue ou de travail lorsque l'on porte un masque de protection.

Nous proposons **deux types de solution** selon le type de masque à équiper :

- Une **solution à coudre** pour les masques en tissu
- Une **solution adhésive** pour les masques chirurgicaux ou certains masques tissu


## FONCTIONNEMENT

Certains masques de protection ne sont pas très étanches en partie haute, principalement les masques tissu. Les personnes portant des lunettes de vue ou de protection ont alors régulièrement des **problèmes de buée sur leurs lunettes**.


En respirant, l'air chaud que l'on expire est dégagé vers le haut du masque et provoque ainsi de la buée. En équipant son masque de PINCE MI, **le masque est ajusté sur le visage et l'étanchéité en partie haute est optimisée**. L'apparition de buée sur les lunettes est donc fortement réduite.



Port d'un masque sans PINCE MI

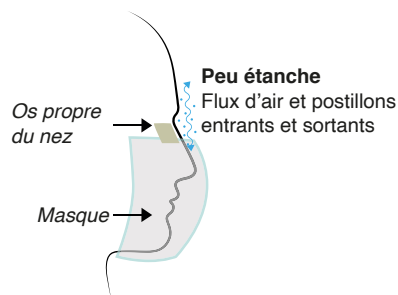

Port d'un masque avec PINCE MI

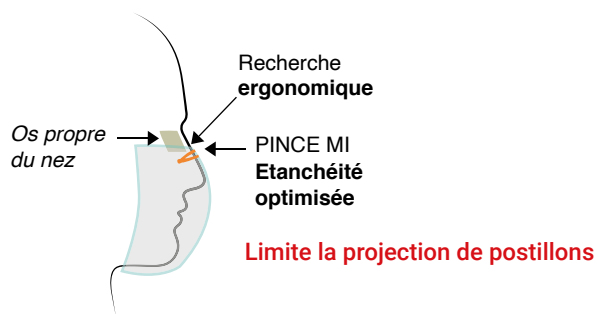

## PLUS DE MAINTIEN ET DE CONFORT


Pince Mi est un accessoire anti buée mais pas que ! Il assure un meilleur maintien du masque sur le visage et réduit ainsi l'inconfort du port du masque.

Un masque de protection équipé d'un PINCE MI glisse beaucoup moins sur le visage. Vous n'êtes plus obligé de le replacer sans cesse, ce qui diminue considérablement les contacts entre les mains et le visage.





# PINCE MI À COUDRE : INSTALLATION

Ne pas installer PINCE MI sur la face intérieure des masques

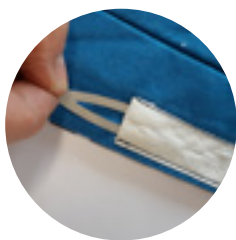


## SOLUTION 1 : FOURREAU OUVERT

Coudre le fourreau ouvert sur l'avant du masque

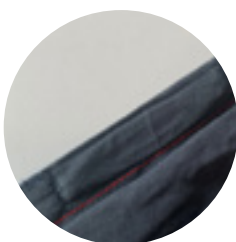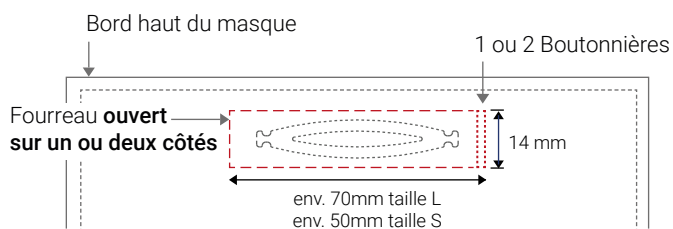

## SOLUTION 2 : FOURREAU FERMÉ

Coudre le fourreau fermé sur l'avant du masque

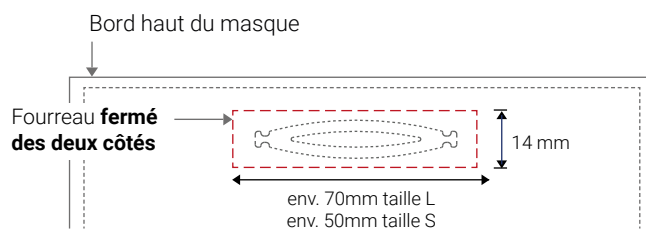


**Ne pas décontaminer le masque au micro ondes**



## SOLUTION 3 : COUSU MAIN

Recommandée uniquement si vous n'avez pas de machine à coudre ou si vous ne pouvez pas faire les solutions 1 et 2

Coudre le PINCE MI sur l'avant du masque (avec un fil solide)

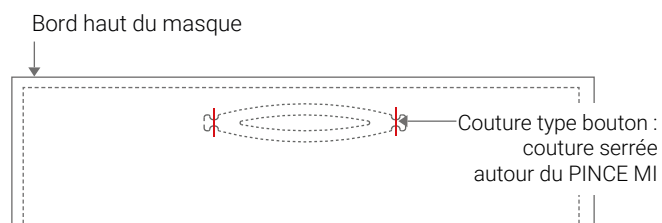


**Ne pas décontaminer le masque au micro ondes**


## 2 TAILLES DISPONIBLES



### TAILLE L : Taille adulte

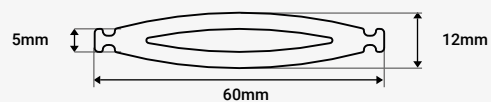


### TAILLE S : Pour petits nez ou les enfants

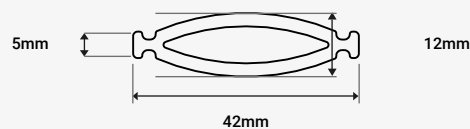




## PINCE MI ADHÉSIF : INSTALLATION

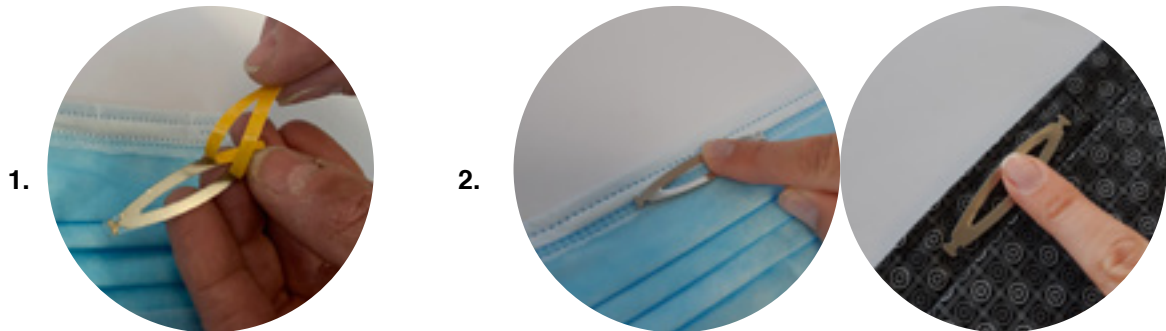

1. Ôter la protection du film autocollant du PINCE MI
2. Coller le PINCE MI à l'avant du masque sur la partie haute  
En fonction de la matière des masques et des conditions d'utilisation, Pince Mi Adhésif peut parfois être repositionné sur plusieurs masques. Nous ne garantissons qu'un seul collage.

### UTILISATION DU PINCE MI

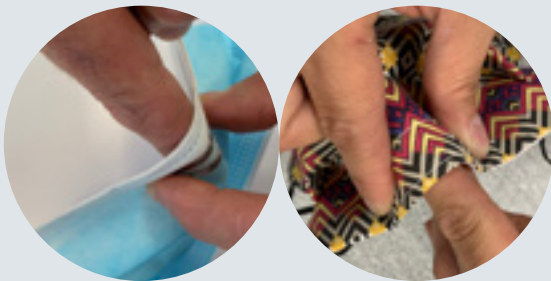


Préformez le PINCE MI à l'aide de votre doigt.  
Le PINCE MI doit être correctement plié (centré et pas trop pointu) sinon son efficacité est altérée.



Installez le masque et ajustez le PINCE MI à la forme de votre nez en le pinçant

× Non centré

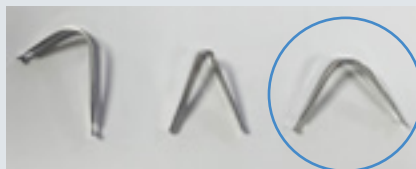

Pliage correct

× Trop pointu

Achat en ligne particuliers ou professionnels  
[smg-decoupage-tolerie.com](http://smg-decoupage-tolerie.com)

Contacts professionnels

Mail : [pince-mi@smgconfrere.com](mailto:pince-mi@smgconfrere.com)

Tél : 03 44 82 25 17 - Port : 06 47 55 21 10

