

Fiche technique



Informations


Désignation	Barre d'angle 2 murs Arsis, Aluminium Epoxy Anthracite
Référence	049731



Les + produit

- + Facilite le déplacement à l'entrée et à la sortie de la douche.
- + Préhension améliorée grâce à son tube elliptique.
- + Se positionne à droite ou à gauche.
- + Fixations invisibles.

Description

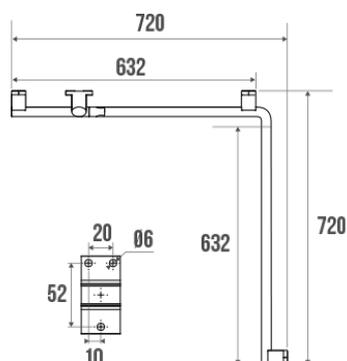

Tube elliptique 38x25 mm en aluminium époxy gris anthracite. Angle 90°. Symétrique. Cache-fixations en résine de synthèse gris anthracite. 3 points de fixations invisibles. Le 3ème point est à positionner pour version droite ou gauche. Garantie anticorrosion.

Visserie fournie.
Le design de ce produit est coordonné aux produits Confort Arsis.
Parfaitement adapté pour l'hôtellerie.

Caractéristiques techniques

Matière	Aluminium
Finition	Epoxy
Couleur	Gris anthracite
Dimensions	632 x 632 mm
Diamètre Ø	38 x 25 mm
Poids brut	1.730 kg
CE - charge admissible	150 kg
Tests laboratoire à	225 kg
Garantie	10 ans

Gencod	3563390497319
Code douanier	7615200000
Notice	A04983001_IND_01
Pièces détachées	Réf. 049007 : Support de fixation alu chromé, Réf. 049008 : Cache-fixation blanc

Conseils de pose et entretien

Hauteur de pose conseillée : 80 cm du sol. Les barres d'appui ajoutent de la sécurité à l'utilisateur si elles sont installées conformément aux instructions. Les efforts supportés par la fixation murale nécessitent une parfaite sélection de la visserie et des chevilles en fonction de la nature du support mural. Nous vous conseillons de choisir des vis en inox pour éviter tout risque de corrosion en milieu humide (\varnothing 4 mm). Avant de percer la cloison, présenter physiquement le produit contre le mur puis marquer les emplacements de perçage. Tous les points de fixation doivent être impérativement respectés. Après montage et avant utilisation, s'assurer que les vis de fixation sont bien serrées. Ne pas utiliser la barre d'appui comme une marche pour atteindre quelque chose, ne pas s'asseoir dessus ou se suspendre.

Entretien

IMPORTANT : Pour garantir la pérennité de ce produit et la sécurité de l'utilisateur, nous recommandons, pour le nettoyage, l'utilisation de savon doux. **ATTENTION, NE PAS UTILISER** des produits de nettoyage à base de cétone, hydrocarbures, acides, bases, esters et éthers. Après utilisation d'un produit de nettoyage, effectuez un rinçage à l'eau claire.

Confort d'usage

Fonction

Maintien	★★★☆☆
Transfert	★★★☆☆

Caractéristiques

Horizontal	★★★★
Anticorrosion	★★★★

Type d'utilisation

Bain	★★★★
Douche	★★★★
Vestiaire/Cabine	★★★★

Lieux d'utilisation

Ets médicaux	★★☆☆
ERP/IOP	★★☆☆
Hôtels	★★☆☆
Habitats privés	★★☆☆
Lieux de travail	★★☆☆

Fiche produit mise à jour le : 08/01/2020