



Désinfection

WYRITOL

PROFESSIONAL DISINFECTION

LINGETTES DÉSINFECTANTES SURFACES x120

Multi usages
Toutes surfaces



- ✓ Lingettes à usage unique légèrement parfumées avec une fragrance Pin
- ✓ Nettoie et désinfecte en un seul geste les objets et les surfaces
- ✓ Sans rinçage*
- ✓ **Bactéricide, lévuricide, virucide**

^ bactéricide, levuricide, virucide

^ sans rinçage*



LINGETTES DÉSINFECTANTES SURFACES x120

CARACTÉRISTIQUES

- Lingettes à usage unique imprégnées d'une solution désinfectante parfumée avec une fragrance pin.
- Formulées pour limiter les risques de contaminations virales et bactériennes.
- Nettoient et éliminent bactéries, levures, virus des surfaces, matériels, mobiliers.*
- Recommandées pour la désinfection quotidienne en milieu médical, CHR, collectivités, entreprises (matériel médical, écoles, crèches, tables, sanitaires, portes et poignées, bureaux, claviers, téléphones...).

* Rincer à l'eau potable les surfaces en contact alimentaire

Activités microbiologiques		Temps d'action
Bactéricide	EN 16615	2 min
	EN 1276 EN 13697	5 min
Lévuricide	EN 16615	2 min
	EN 1650 EN 13697	15 min
Virucide	EN 14476 sur HBV, BVDV, H1N1, Herpes, Vaccinia, Rotavirus	5 min
	EN 14476 sur Norovirus	15 min
** En conditions de saleté à 20°C		

MODE D'EMPLOI

- A utiliser quotidiennement pour nettoyer et désinfecter en un seul geste toutes les surfaces.
- Les boîtes sont scellées avec un opercule aluminium pour vous garantir un niveau d'imprégnation optimal, sans dessèchement pendant le transport et le stockage.
- Ouvrir le couvercle, ôter l'opercule lors du 1^{er} usage, sortir la lingette.
- Frotter les surfaces avec la lingette pendant 30 secondes.
- Laisser agir pendant 5 à 15 minutes selon l'activité souhaitée.
- Inutile de rincer, hors surfaces en contact alimentaire.
- Bien refermer la boîte après chaque usage.

CONDITIONNEMENT

PRODUIT	CODE PRODUIT	GENCOD	UNITÉS PAR CARTON	CARTONS PAR COUCHE	CARTONS PAR PALETTE	NOMBRE DE COUCHES
Lingettes désinfectantes surfaces x120	PV56151003	3661295615101	12	10	80	8

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

PROVEN ORAPI ne peut avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisées ses produits et des conditions de leur emploi. PROVEN ORAPI n'assume aucune responsabilité quant à la convenance de ses produits pour une utilisation donnée ou dans un but particulier. Les informations ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu'il est indispensable d'effectuer pour vérifier l'adéquation du produit à chaque cas déterminé.



21 allée Louis Breguet
93420 Villepinte
www.proven.fr

N°Azur 0 810 400 402