


Série 1900 Cannelées, Lisses et Antibactériennes

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

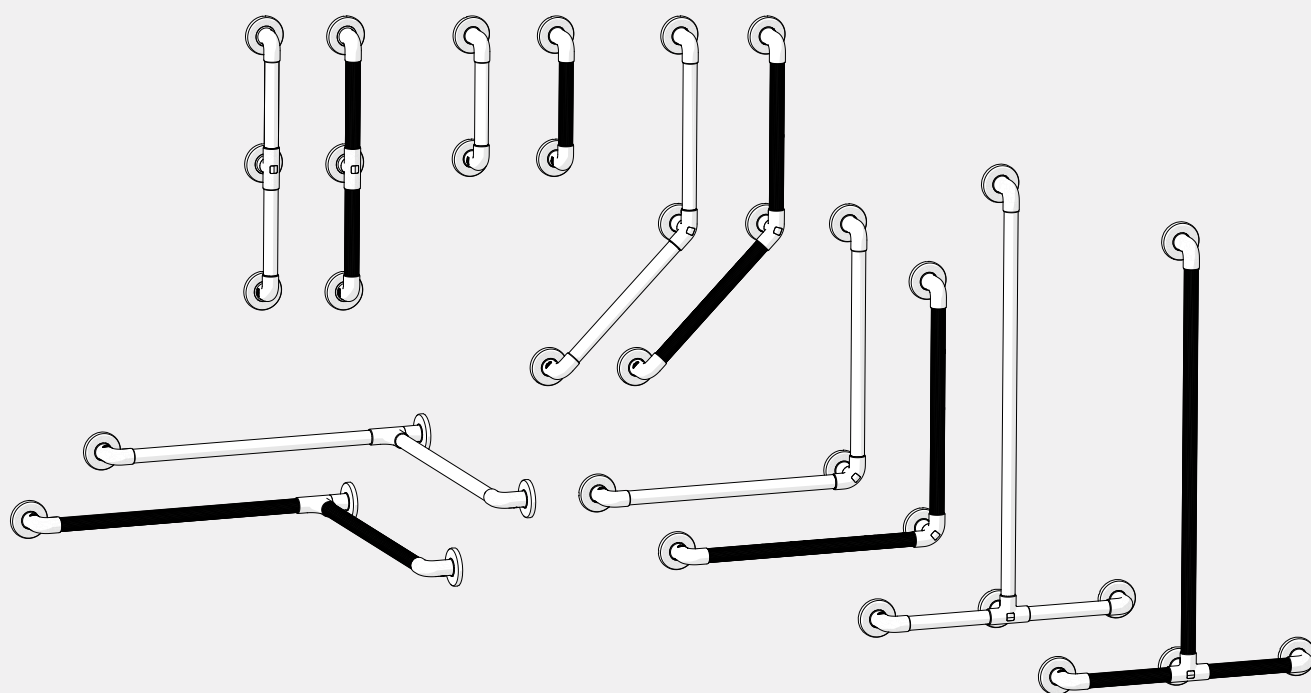

Veuillez lire toutes les instructions avant l'installation et laissez ce document à l'utilisateur final pour référence ultérieure car il contient des informations importantes sur la garantie.

L'installation doit être effectuée conformément à ces instructions, et doit être réalisée par un installateur compétent.





Important

Avant de fixer quoi que ce soit aux murs, assurez-vous que la construction de ce type de mur est capable de supporter le poids maximal de l'unité chargée et que les fixations et accessoires appropriés sont utilisés pour ce type de mur. Les fixations murales ne sont pas fournies. Il est recommandé d'utiliser tous les trous de fixation du support. N'utilisez pas de vis à tête fraisée.


Avant de commencer

Retirez toute enveloppe de protection et examinez attentivement le produit. Vérifiez que tous les éléments sont présents avant de jeter l'emballage. Veuillez informer immédiatement le détaillant de tout dommage ou défaut. Le fabricant ne peut être tenu responsable des coûts d'installation qui pourraient résulter de l'installation de produits endommagés ou défectueux et non conformes à ces instructions. Conservez les petites pièces et l'emballage hors de portée des enfants et éliminez tous les emballages conformément aux autorités locales chargées du recyclage.

Pour les barres d'appui avec **deux supports** muraux, veuillez suivre les instructions ci-dessous:

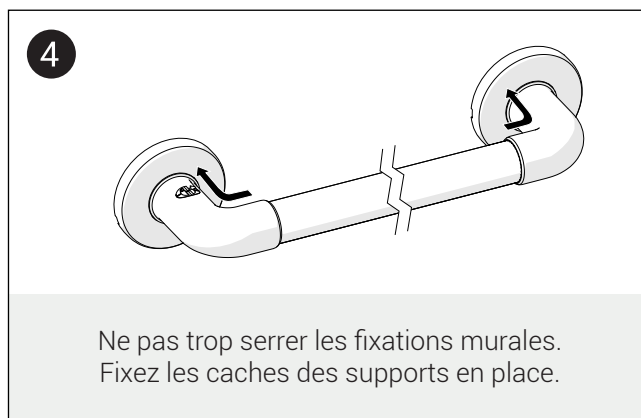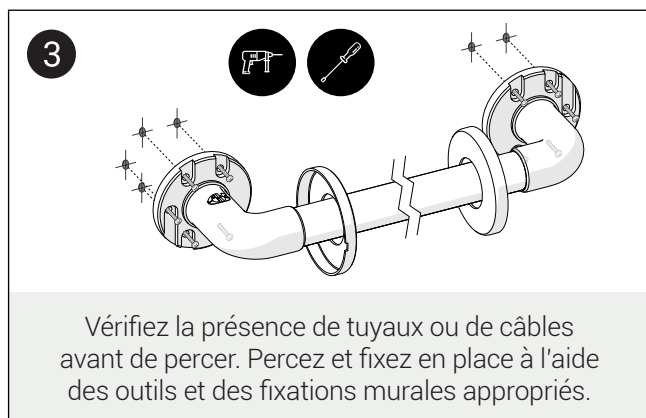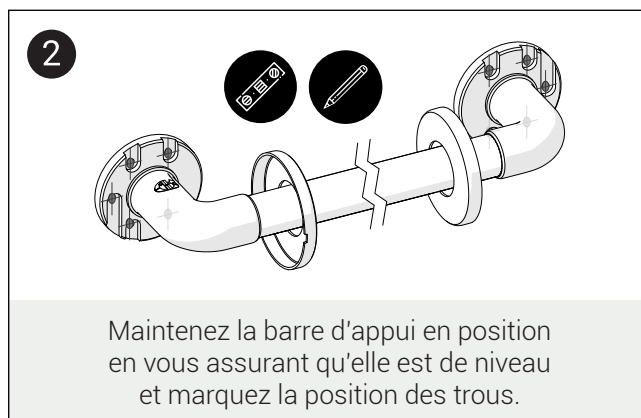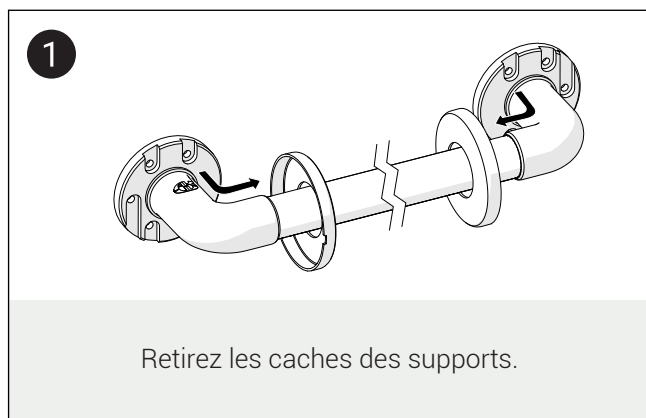

Pour les barres d'appui avec **trois supports muraux ou plus**, vous rencontrerez certains des coudes suivants:

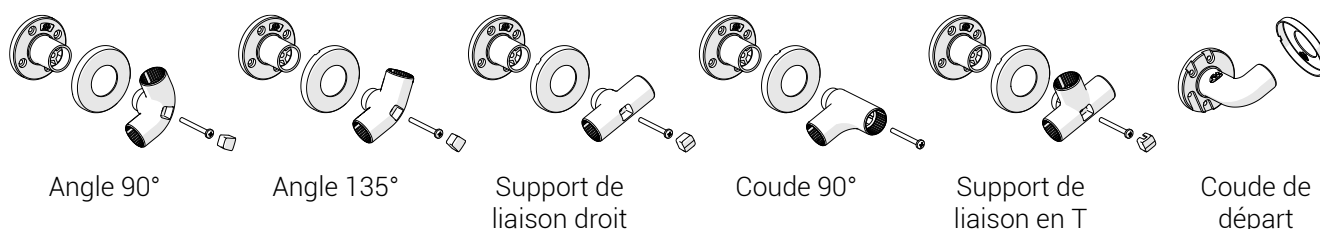

Commencez par installer le(s) coude(s) du milieu vers l'extérieur, en veillant toujours à ce que la barre soit de niveau.

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT ET INFORMATIONS SUR LES DONNÉES

Poids maximal de la charge:

Série 1900 Barre Renforcé 30 stone (190kg)

Série 1900 Barres Lisses et Antibactériennes 15.7 stone (100kg)

La charge pondérale se réfère à la barre d'appui uniquement, appliquée pendant moins de 30 minutes sur une période de 60 minutes.

Les fixations et la rétention dans la surface de montage sont la responsabilité de l'installateur.

Plage de température de fonctionnement standard: -5°C à +35°C.

Matériaux de construction:

Supports: PVC-U | Couvertres de support: PVC-U | Barres: PVC-U - Inserts en acier inoxydable
Certains supports comprennent des fixations en acier inoxydable.

Options Disponibles

Barres PVC Cannelées

Produit	Diamètre	Longueur*	Hauteur**	Coloris	Référence
Barre PVC Cannelé 300mm	32mm	305mm	38mm	Blanc Blue	01900WH 01900BU
Barre PVC Cannelé 400mm	32mm	407mm	38mm	Blanc Blue	01905WH 01905BU
Barre PVC Cannelé 450mm	32mm	457mm	38mm	Blanc Blue	01910WH 01910BU
Barre PVC Cannelé 600mm	32mm	610mm	38mm	Blanc Blue	01920WH 01920BU
Barre PVC Cannelé 800mm	32mm	813mm	38mm	Blanc Blue	01930WH 01930BU
Barre PVC Cannelé 900mm	32mm	914mm	38mm	Blanc Blue	01940WH 01940BU
Barre PVC Cannelé 1000mm	32mm	1067mm	38mm	Blanc Blue	01950WH 01950BU
600x600mm Barre PVC Cannelé Coudée (90°)	32mm	601x610mm	38mm	Blanc Blue	01925WH 01925BU
450x450mm Barre PVC Cannelé Coudée (135°)	32mm	455x455mm	38mm	Blanc Blue	01915WH 01915BU

* Distance entre le centre des supports muraux. ** Distance entre le mur et la barre.

Barres PVC Lisses

Produit	Diamètre	Longueur*	Hauteur**	Coloris	Référence
Barre PVC Lisse 300mm	32mm	305mm	61.5mm	Blanc	11900WH
Barre PVC Lisse 450mm	32mm	457mm	61.5mm	Blanc	11910WH
Barre PVC Lisse 600mm	32mm	610mm	61.5mm	Blanc	11920WH
Barre PVC Lisse 800mm	32mm	813mm	61.5mm	Blanc	11958WH
Barre PVC Lisse Main Courante - Opt. 1	32mm	1067mm	61.5mm	Blanc	11941WH
Barre PVC Lisse Main Courante - Opt. 2	32mm	1067mm	61.5mm	Blanc	11942WH
Barre PVC Lisse Main Courante - Opt. 3	32mm	1067mm	61.5mm	Blanc	11943WH
Barre PVC Lisse Main Courante - Opt. 4	32mm	1067mm	61.5mm	Blanc	11944WH
Barre PVC Lisse Main Courante - Opt. 5	32mm	1067mm	61.5mm	Blanc	11945WH
450x450mm Barre PVC Lisse Coudée (90°)	32mm	450x450mm	61.5mm	Blanc	11925WH
300x300mm Barre PVC Lisse Coudée (135°)	32mm	300x300mm	61.5mm	Blanc	11905WH
450x450mm Barre PVC Lisse Coudée (135°)	32mm	450x450mm	61.5mm	Blanc	11915WH

* Distance entre le centre des supports muraux. ** Distance entre le mur et la barre.

Accessoires Pour Barres d'Appui Lisses

Produit	Diamètre	Longueur*	Coloris	Référence
Barre Lisse 300mm	32mm	300mm	Blanc	11951WH
Barre Lisse 450mm	32mm	450mm	Blanc	11954WH
Barre Lisse 600mm	32mm	600mm	Blanc	11956WH
Barre Lisse 700mm	32mm	700mm	Blanc	11957WH
Barre Lisse 800mm	32mm	800mm	Blanc	11958WH
Barre Lisse 1000mm	32mm	1000mm	Blanc	11955WH
Barre Lisse 1200mm	32mm	1200mm	Blanc	11959WH
Support pour Barre Lisse	N/A	N/A	N/A	11961
Angle 90°	N/A	N/A	N/A	11963
Angle 135°	N/A	N/A	N/A	11964
Support de Liaison Droit	N/A	N/A	N/A	11965
Support de Liaison en T	N/A	N/A	N/A	11968
Coude de Départ	N/A	N/A	N/A	11969

* Distance entre le centre des supports muraux. ** Distance entre le mur et la barre.

Barres PVC Antibactériennes

Produit	Diamètre	Longueur*	Hauteur**	Coloris	Référence
Barre Antibactérien 300mm	32mm	305mm	61.5mm	Blanc	11900WH-AB
Barre Antibactérien 450mm	32mm	457mm	61.5mm	Blanc	11910WH-AB
Barre Antibactérien 600mm	32mm	610mm	61.5mm	Blanc	11920WH-AB
450x450mm Barre Antibactérien (135°)	32mm	455x455mm	61.5mm	Blanc	11915WH-AB
Barre Antibactérien en T - Option 1	32mm	1200x300mm	61.5mm	Blanc	11941WH-AB
Barre Antibactérien Option 2	32mm	1200x300x700mm	61.5mm	Blanc	11942WH-AB
Barre Antibactérien en L - Option 5	32mm	1200x450mm	61.5mm	Blanc	11945WH-AB

* Distance entre le centre des supports muraux. ** Distance entre le mur et la barre.

Contactez-nous

AKW
Life Made Better

Renseignements généraux

0032 74 74 33 85

Fax

0032 68 33 16 58

Site Internet

www.akw-medicare.com

Courriel et commandes

ism@akw-medicare.com

AKW

29E Rue de la Terre à Brique
7522 Marquain
Belgique

Suivez-nous:



Garantie

La garantie s'applique uniquement aux défauts de fabrication ou de matériaux, sous réserve de l'installation correcte unique du produit.

Ne s'applique pas à:

- Casses, utilisation inappropriée ou dommages accidentels.
- Dommages ou défauts résultant d'une installation incorrecte.
- Les dommages causés par un manque d'entretien, y compris l'accumulation de saleté ou les dommages résultant d'un nettoyage inapproprié.
- Les dommages ou défauts résultant de réparations ou de modifications effectuées par des personnes non autorisées.
- Cette garantie exclut l'usure générale due à l'utilisation et ne s'applique pas aux finitions de surface.

Que faire si quelque chose ne va pas?

Si vous rencontrez un problème avec ce produit, veuillez contacter votre installateur local et si cela ne résout pas le problème, contactez les demandes de renseignements techniques d'AKW qui vous fournira des conseils supplémentaires et, si nécessaire, organisera la visite d'un ingénieur de maintenance et signalera tout problème. Consultez les CGV sur notre site Internet ou notre catalogue pour plus d'informations. Aucun de ce qui précède n'affecte vos droits statutaires.