
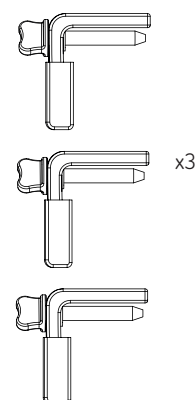


Notice d'installation pour rehausse WC


REMARQUE: ASSUREZ-VOUS QUE TOUTES LES PIÈCES SONT PRÉSENTES ET NON ENDOMMAGÉES AVANT LE MONTAGE.

PIÈCES FOURNIES

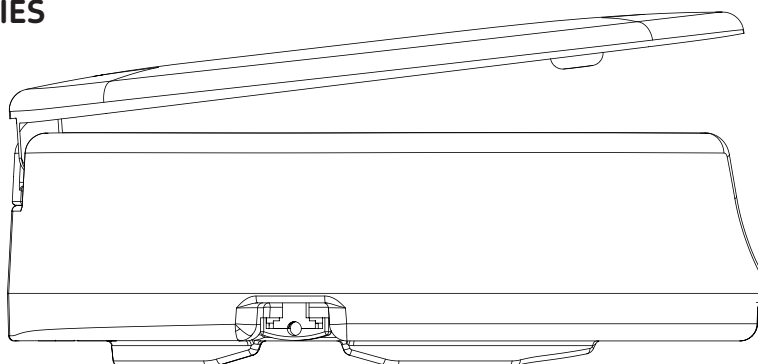


Assemblage

Etape 1

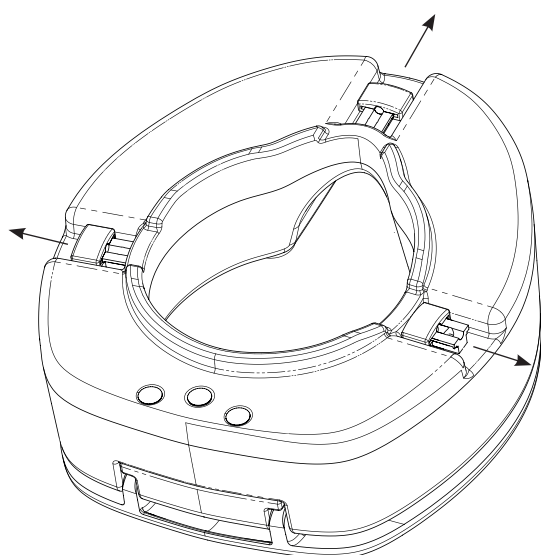


Déplacez les 3 clips comme indiqué ci-dessus.

Etape 2

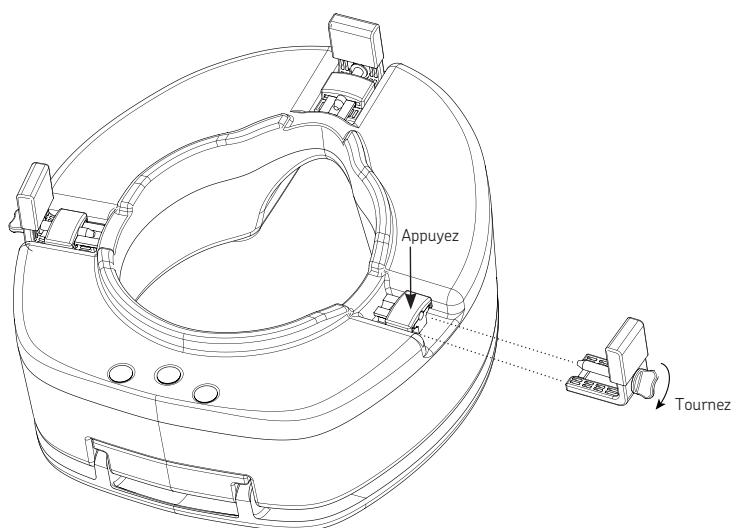


Appuyez sur le haut des clips pour insérer les supports de fixation sur les 3 côtés. Une fois insérés, serrez la vis d'environ 5 à 8 tours pour bien fixer le support.

Etape 3

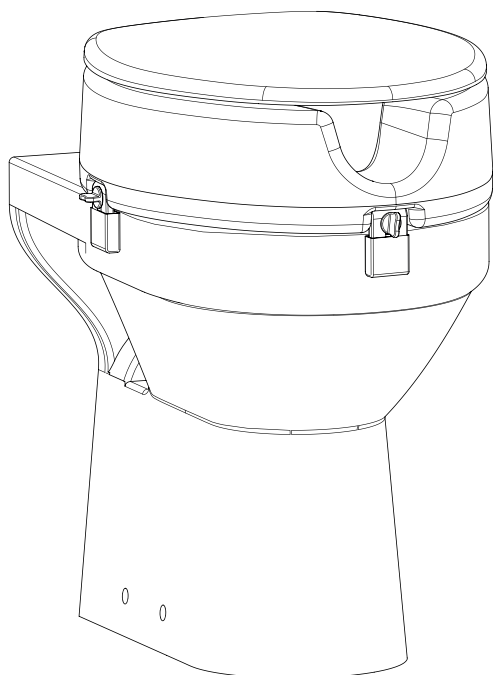

Placez le siège sur la céramique et ajustez-le pour correspondre au WC. Une fois en position, vissez les vis dans le sens des aiguilles d'une montre.

Etape 4

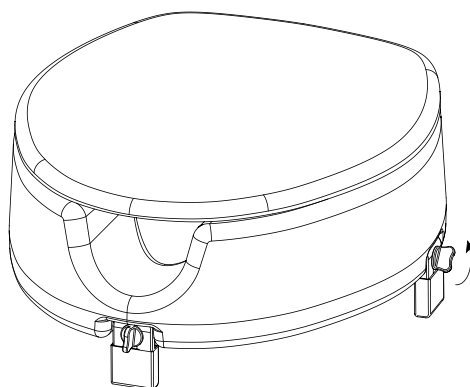

Pour libérer le siège, faites pivoter les vis de fixation dans le sens anti-horaire.

Instructions d'entretien

Il est recommandé de nettoyer la rehausse WC à l'aide d'un savon pur liquide et sans ammoniac pour éliminer les taches de surface ou les taches d'eau. Rincez toutes les traces de savon. Utilisez un chiffon doux pour nettoyer et sécher le produit.

N'utilisez pas d'éponge ou de nettoyeurs abrasifs. Ceci pourrait altérer la surface du produit.

Consultez un professionnel de la santé pour obtenir des conseils et des instructions spécifiques à vos besoins avant utilisation.

Ne modifiez pas ce produit.

Après l'installation, vérifiez périodiquement ce siège pour vous assurer que le siège est bien fixé et les vis bien serrées.

Votre produit bénéficie d'une garantie à vie à compter de la date d'achat. La garantie à vie s'applique uniquement aux défauts matériels ou de fabrication. Elle ne couvre pas : l'utilisation inappropriée ; l'usure normale ; les dommages accidentels ; les dommages ou défauts qui résultent d'une mauvaise installation, d'une mauvaise utilisation ; les dommages causés par le non respect de ces instructions d'installation ; les dommages accidentels ; les dommages résultants d'un manque d'entretien (y compris l'accumulation de saleté, la poussière ou les débris d'origine hydrique) ; les dommages résultant d'un nettoyage inapproprié ou d'infiltration d'eau ; les dommages ou défauts qui résultent de réparations ; les dommages liés au gel ; les modifications effectuées par des personnes non autorisées et qui ne sont pas des installateurs ou des techniciens agréés. Cette garantie exclut l'usure normale du produit et ne s'applique pas aux traitements de surface. N'utilisez pas d'éponge ou de nettoyeurs abrasifs. Ceci peut altérer la surface du produit et annulerait votre garantie. Pour les problèmes d'installation, contactez votre installateur local. L'installateur peut résoudre la majorité des problèmes et, le cas échéant, choisir de contacter AKW. Dans ce délai, AKW décidera de réparer ou de remplacer le produit. Les travaux ne doivent être entrepris que par des installateurs agréés et avec l'accord préalable. Ne pas installer ce produit AKW conformément aux instructions fournies ou réaliser des modifications non autorisées annulera toute garantie et peut affecter la sécurité des produits. Aucune de ce qui précède affecte vos droits statutaires. Cette garantie s'ajoute à vos droits légaux et entre en vigueur à compter de la date d'achat. Pour valider la garantie, vous devez conserver une preuve d'achat. Rien de ce qui précède n'affecte vos droits statutaires.

Téléphone EU : +32 (0) 68 33 48 99 – Téléphone FR : 09 72 29 24 05 – Fax : +32 (0) 68 33 16 58

Email : ism@akw-medicare.com

Adresse : 117 Avenue Victor Hugo – 92100 Boulogne Billancourt (France)